

Manumed T

Handgelenkorthese mit Daumenauflage

Wrist brace with thumb support

Orthèse poignet pouce

Ortesis de muñeca con soporte de pulgar

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию. Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής.



1



2



3



4

Manumed T

Назначение

Бандаж на лучезапястный сустав Manumed T может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Растяжение связок запястья и/или большого пальца кисти
- Послеоперационная фиксация запястья и/или большого пальца кисти
- Повреждение локтевой коллатеральной связки и основания большого пальца кисти
- Тендиниты и теносиновиты запястья и/или большого пальца кисти
- Ревматоидный артрит

Противопоказания

- До настоящего времени не выявлены

Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация запястья и большого пальца кисти

Рекомендации по применению

Для достижения максимального лечебного эффекта Manumed T следует носить регулярно.

Рекомендации по надеванию

Правильное положение шины крайне важно для оптимального функционирования; в первый раз изделие должно быть надето обученным специалистом.

- При необходимости алюминиевую шину можно вытащить и моделировать индивидуально.
- Расстегните все ленты и наденьте изделие со вставленной алюминиевой шиной на руку (рис. 1).

- В первую очередь застегните узкую ленту на ладонной части шины, затем — ленту на предплечье (рис. 2).
- Теперь застегните широкую ленту. Эта лента прикреплена к ладонной поверхности изделия при помощи липучки и может быть передвинута в нужное положение (рис. 3)
- Зафиксируйте ремешок для большого пальца вокруг большого пальца кисти (рис. 4).

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застешки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, полиамид.

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!